


มีคู่มือการใช้งานของระบบเรียกพยาบาล

ขั้นตอนวิธีการใช้งานระบบเรียกพยาบาล
เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

กด 1 เพื่อพูดคุยติดต่อกับเจ้าหน้าที่
กด 2 กริ่งฉุกเฉินเรียกเจ้าหน้าที่

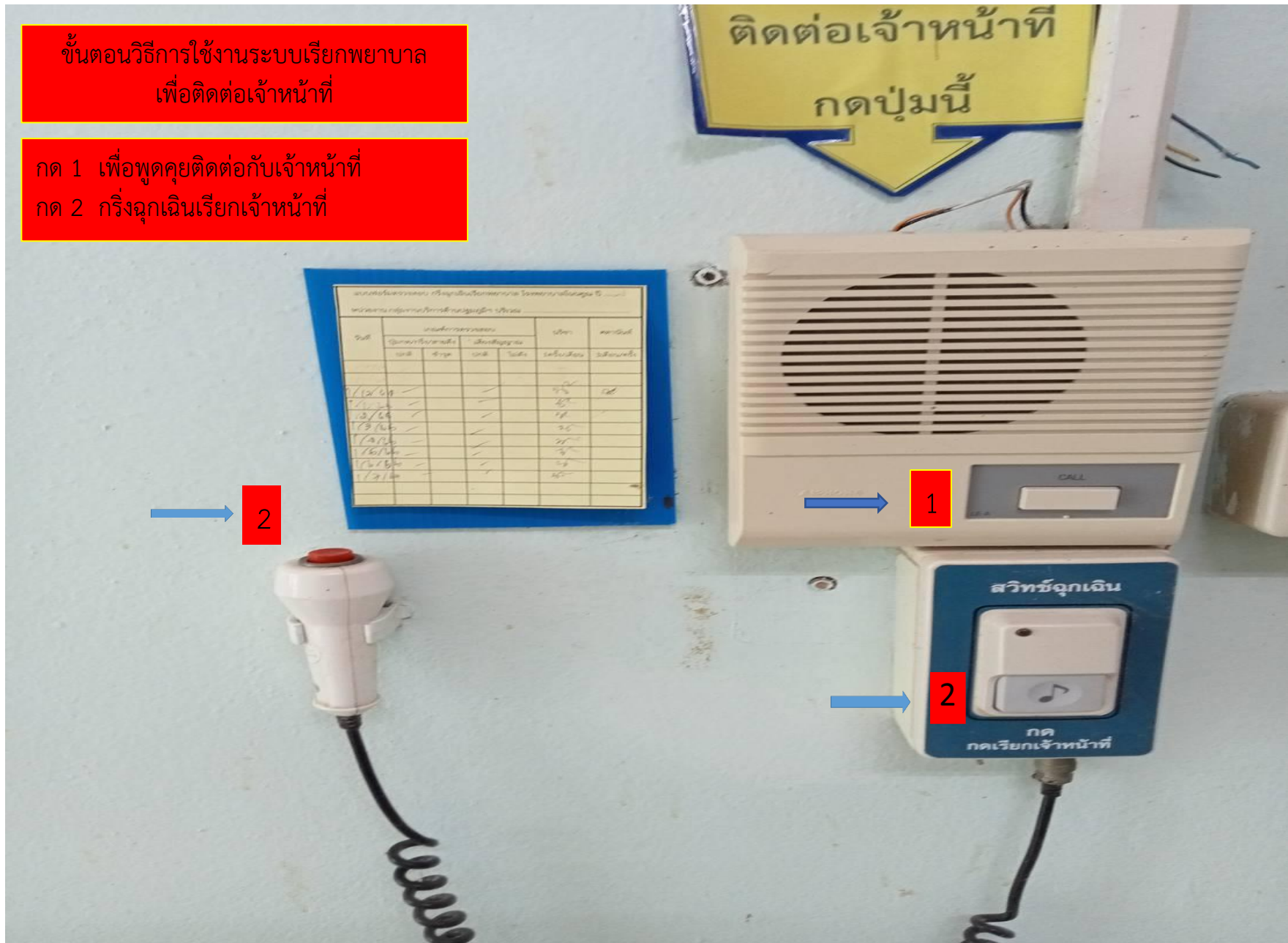

คู่มือการใช้งานเครื่องเรียกพยาบาล



ยี่ห้อ AIPHONE รุ่น LEF - 10

ฟังก์ชัน/ศัพท์เฉพาะ

1. OFF = ปิด
2. PRIV = ความเป็นส่วนตัว
3. TALK = คุย
4. VOICE VOL =
5. OCCUPIED = ไม่ว่าง
6. CALL = โทร / พูดคุย / เรียกหา

วิธีการใช้งาน

- กรณีห้องผู้ป่วยเรียก
1. เมื่อมีผู้ป่วยเรียกให้กดปุ่มหมายเลขห้องที่เรียกเพื่อสนทนาและเมื่อเลิกพูดคุยสนทนาเสร็จให้กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดการสนทนากับผู้ห้องผู้ป่วยที่เรียกเข้า เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานต่อไป
- ในการณ้เจ้าหน้าที่เรียกห้องผู้ป่วย
1. ให้กดปุ่มหมายเลขห้อง แล้วให้กดปุ่ม TALK เพื่อพูดคุยสนทนา เมื่อพูดคุยเสร็จให้กดปุ่มกลับไปตำแหน่งเดิม

แผนผังการใช้งานกริ่งฉุกเฉิน



วิธีการใช้งาน

เมื่อมีการกดจากจุดเรียก เครื่องจะมีเสียงเรียก พร้อมไฟไซร์แจ้งเตือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบบริเวณจุดนั้น เมื่อตรวจสอบเสร็จ ให้กดปุ่มรีเซ็ตเพื่อปิดสัญญาณเสียงไซร์สถานะ

* หมายเหตุ * ปุ่มรีเซ็ตสามารถกดได้ที่เครื่องหลักรับสัญญาณ หรือรีเซ็ตที่ส่งสัญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุ