

คู่มือการใช้งานเครื่องเรียกพยาบาล (สำหรับเจ้าหน้าที่)



ลำโพง

ตัวเครื่อง

ปุ่มกด

ไฟชาร์จสถานะ

ยี่ห้อ AIPHONE

รุ่น LEF - 10

ฟังก์ชัน/ศัพท์เฉพาะ	วิธีการใช้งาน
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. OFF = ปิด</li> <li>2. PRIV = พริบ</li> <li>3. TALK = คอย</li> <li>4. VOICE VOL =</li> <li>5. OCCUPIED = ไม่ว่าง</li> <li>6. CALL = โทร / พูดคุย / เรียกหา</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรณีห้องผู้ป่วยเรียก</li> <li>1. เมื่อมีผู้ป่วยเรียกให้กดปุ่มหมายเลขห้องที่เรียกเพื่อสนทนาและเมื่อเลิกพูดคุยสนทนาเสร็จให้กดปุ่มอีกครั้งเพื่อปิดการสนทนากับผู้ห้องผู้ป่วยที่เรียกเข้า เพื่อให้เครื่องพร้อมใช้งานต่อไป</li> <li>- ในการณเจ้าหน้าที่เรียกห้องผู้ป่วย</li> <li>1. ให้กดปุ่มหมายเลขห้อง แล้วให้กดปุ่ม TALK เพื่อพูดคุยสนทนา เมื่อพูดคุยเสร็จให้กดปุ่มกลับไปตำแหน่งเดิม</li> </ul>